

ПОРТАТИВНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ

ВМ 2523 / 60 см

RELAX **DELUX**

инструкция по сборке



RELAX **DELUX**



ВВЕДЕНИЕ

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией. При правильном пользовании и обслуживании, массажный стол прослужит в течении длительного времени.

В комплект входит:

Массажный стол 1 шт. / Отверстие для лица 1 шт. / Подушка для лица 1 шт. Рама для лица 1 шт. / Полка для рук 1 шт. / Подлокотник 2 шт. Сумка-чехол 1 шт. / Инструкция 1 шт.

Модель	BM2523-1.2.3
Наименование	Складной массажный стол с деревянным основанием
Размер	185*70*(60-80) см (регулировка высоты)
Грузоподъемность	Менее 270 кг

Складывание/раскладывание



Этапы сборки:

- 1. Чтобы разложить стол, расположите его на ровной поверхности боковой стороной вниз. Разложите стол медленно, пока он не откроется на 90 градусов. Затем разложите деревянные части.
- 2. Чтобы сложить стол, расположите его на ровной поверхности боковой стороной вниз. Складывайте стол медленно, пока он не слежится на 90 градусов. Затем сложите деревянные части.
- 3. Убедитесь, чтобы эластичные веревки не попали в места соединения алюминиевых частей.

Установка подушки для лица:





RELAX **DELUX**




Установка подушки для лица:





Регулировка высоты:

Поверните 2 барашка против часовой стрелки на деревянной стойке таким образом, чтобы стойка опустилась вниз. Поднимите стойку и установите на нужную для вас высоту. Выставите ноги по высоте и закрутите барашком по часовой стрелке.

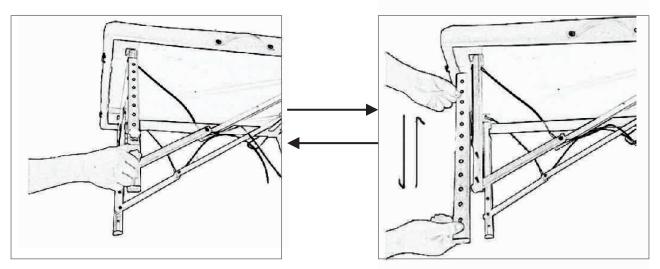

Уход:

- 1. Используйте массажный стол по назначению.
- 2. Очищайте стол от пыли и грязи теплой мыльной водой, а затем протрите его сухой тряпкой.
- 3. Не используйте для очистки грубые химические средства.
- 4. При длительном неиспользовании стола, сложите его и уберите в сухое/прохладное место. Для этого расположите основание подголовника и подушку для лица в специальное место под стол и закрепите эластичными веревками.

Обслуживание:

В случае поломки некоторых деталей, обратитесь к продавцу для их замены или починки.